



Inhalation einfach und effektiv
Schnuller-Inhalationsmaske für Kinder



BreasyBedienungsanleitung

Die Breasy Inhalationsmaske ist für Kinder zwischen 1 und 3,5 Jahren für die Anwendung zur Inhalation von Medikamenten im flüssigen oder pulverisierten Zustand und für die Gabe von Sauerstoff bestimmt. Sie kann mit handelsüblichen Verneblereinheiten oder Spacer verwendet werden. Im klinischen Bereich ist die Breasy auch für die prä-operative Behandlung in der Anästhesie einsetzbar.

Durch die Kombination von Maske und Schnuller verringert sich der Widerstand des Kindes gegen die Therapie und verbessert damit die Effizienz der Behandlung.

Breasy – Zubehör:

1. Maske; 2. Schnuller (nicht im Lieferumfang enthalten); 3. Adapter für Verneblereinheit; 4. Adapter für Sauerstoffgabe

Vorsichtsmaßnahmen:

Die Maske ist nur für einen Anwender bestimmt.

Vor dem Gebrauch ist diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

Verwenden Sie die Maske nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder Teile fehlen.

Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Fremdkörper.

Vor der ersten Anwendung reinigen Sie die Maske wie unter „Reinigen der Breasy Maske“ beschrieben.

Vorbereitung:

Setzen Sie den Schnuller in die dafür vorgesehene Öffnung (A) ein – jeder handelsübliche Schnuller passt (2).

Ab 1 Jahr und älter wird empfohlen, das Kind vor der Behandlung mit der Maske vertraut zu machen. Lassen Sie das Kind unter Aufsicht mit der Maske spielen und sie sich selbst auch auf das Gesicht setzen.

Wenn das Kind mit der Maske vertraut ist, kann mit der Behandlung begonnen werden.

Anwendung


Verneblereinheit: Befestigen Sie den Adapter (3) an der Verneblereinheit (5).

Anschließend verbinden Sie den Adapter mit der Maske.

Spacer: Verbinden Sie den Spacer(6) direkt mit der Maske.

Folgen Sie in beiden Fällen der Bedienungsanleitung des Herstellers.

Sauerstoff: Verbinden Sie den Sauerstoffadapter (4) direkt mit der Maske und schließen die Sauerstoffleitung an (C).

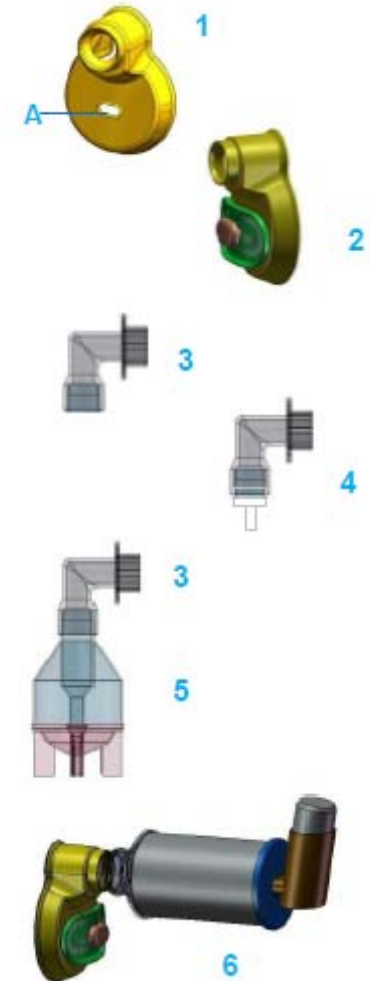

Anästhesie zur prä-operativen Behandlung: Verbinden Sie den Anästhesie-Tubus (B) mit der Maske, wenn diese richtig auf dem Gesicht des Kindes positioniert ist.

Reinigen der Breasy Maske:

Die Maske muss nach jedem Gebrauch wie folgt gereinigt werden:

Legen Sie alle Teile der Maske 15 Min. in eine Lösung aus warmen Wasser und Geschirrspülmittel. Bewegen Sie die Teile leicht in dem Wasser.

Spülen Sie die Teile unter fließendem Wasser gründlich ab und lassen sie gut abtropfen.

Lassen Sie die Teile an der Luft trocknen oder trocknen sie mit einem sauberen Tuch ab.



Warnung

Vor dem Gebrauch ist die Bedienungsanleitung zu lesen. Bitte heben Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

Lesen Sie die entsprechenden Anweisungen von Spacer und Verneblereinheit, die an die Maske angebracht werden sollen.

Während der Anwendung das Kind nie unbeaufsichtigt lassen.

Nur Medikamente in der empfohlenen Dosis einsetzen, wie sie vom Arzt verschrieben wurden.

Erlauben Sie dem Kind nicht, in die Maske zu beißen. Eine beschädigte Maske darf nicht mehr verwendet werden.

Die **Breasy** Maske ist ein medizinisches Produkt. Damit dieses ordnungsgemäß funktioniert, halten Sie sich bitte an die vorgeschriebene Reinigungsanleitung. Die Maske darf nicht im Geschirrspüler oder mit kochendem Wasser gereinigt werden.


Anmerkung:

Die Maske sollte bei Dauergebrauch nach 12 Monaten durch eine neue Maske ersetzt werden.

Umgebungsbedingungen, Lagerung und Verwendungshäufigkeit können die Lebensdauer des Produktes beeinflussen.



Kast Silicone LTD. Ahar St. 3, Har-Tuv Industrial Zone A, Bet Shemesh, 99067 Israel

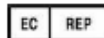

MedNet GmbH, Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany, Tel +49 (0) 251 32266-0, Fax +49 (0) 251 32266-22



Manufactured for Healthier Globe, Ltd.

